

Microbiologie | 04/11/2024 | N°129

## Préanalytique QuantiFERON-TB GOLD Plus: Tube d'héparine de Lithium

### 1 – PRELEVEMENT SANGUIN

- Utiliser un tube de sang Héparine de Lithium de 7.5ml pour réaliser le prélèvement.




*Image 1 : S-Monovette® Sarstedt 7.5ml  
Héparine de Lithium liquide*

- Identifier le tube avec les données du patient.
- Remplir le tube avec 7.5ml de sang.
  - Un **volume minimal de ≥5ml** est requis.
  - **L'analyse sera annulée en cas de volume insuffisant.**
- Mélanger doucement en retournant plusieurs fois le tube.
- Noter sur la feuille de demande l'heure de prélèvement.
- Les prélèvements doivent être envoyés à admed Microbiologie dans les meilleurs délais.

### 2 – CONSERVATION DU PRELEVEMENT AVANT ENVOI

- Acheminement au laboratoire de microbiologie dans les meilleurs délais.
- Garder le prélèvement au frigo (2-8°C) jusqu'à la prise en charge par le transporteur *admed*.

### RESUME

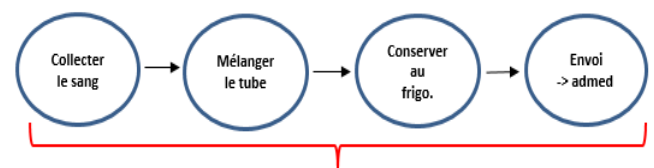

Les prélèvements doivent nous parvenir au plus vite

### 3 - CONTACTS

*admed* Transport 032 967 20 33

*admed* Microbiologie 032 967 21 01

Laboratoire de sérologie 032 967 21 29

